



Datenblatt

Augennotfallstation 1x200 - 1 L / 1 ST
ml pH Neutral, 1x0,5l Augenspül. PLUM
Artikelnummer: 4000386422



Beschreibung:

Augennotfallstation 1x200 ml pH Neutral, 1x0,5l Augenspülung PLUM · Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren

Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet · Spülzeit ca. 7 min · Anwendung: die Flasche aus dem Halter herausnehmen, die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen bei Verätzungsgefahr durch Säuren und Alkali wird die neutralisierende 200-ml-Augenspüllösung ph Neutral empfohlen · im Anschluss daran wird eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,5-l-Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung empfohlen · die 0,5-l-Augenspüllösung wird auch bei Fremdkörpern, z. B. Staub, Schmutz, Metall- bzw. Holzsplitter verwendet · Weitere technische Eigenschaften Haltbarkeit: 3 Jahre (ungeöffnete Flasche) · Spülzeit ca.: 7min · Ausführung: Kennzeichnung Augenspülung, Spiegel · prüfpflichtig: ja

Produktmerkmale:

Breite	227 mm
Ausführung	Augen-Notfallstation
Tiefe	110 mm
Höhe	265 mm



Augen-Notfallplan

plum
www.plum.de

SCHMUTZ- UND SCHADSTOFFEINWIRKUNG	EMPFOHLENE SPÜLLÖSUNG	FORTSETZUNG DER SPÜLUNG BIS ZUR ÄRZTLICHEN BEHANDLUNG	EMPFOHLENE SPÜLUNG
Fremdkörper (z. B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter)	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säureschäden	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Alkalische Schäden	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Sonstige Schäden (z.B. Lötlotmittel und Öle)	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Schäden auf der Haut durch Säuren, Alkali und Chemikalien	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Haut mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.

plum



Wichtig!
Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und geschwämmigen Stoff gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorgangs leicht drücken. Articulier fließt bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einströmen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.

Konrad Hog Werkvertretungen GmbH
Feldbergstraße 37
79822 Titisee-Neustadt
0 76 51 / 9 21 40

0 76 51 / 9 21 44
info@hoggmbh.de
www.hoggmbh.eu