



Datenblatt

NANO-Vlies Gesichtsmaske, weiß, - 100 ST

Artikelnummer: EDF02-C



Beschreibung:

Variante C) 4 Schnüre zum Binden am Hinterkopf

Großpackung, ideal für Ihre Kunden, Mitarbeiter oder den Wiederverkauf!

Diese Gesichtsmaske funktioniert auf der Basis einer Filtration mit einem Wirkungsgrad von 80-93%. Die Lebensdauer hängt von der Luftverschmutzung und dem Umgang damit ab. Die NANO-Gesichtsmaske ist für die Wiederverwendung vorgesehen. Es ist ein feiner Vliesstoff mit einer Membran im Inneren, die eine schonende Handhabung erfordert. Leichtes, einlagiges, angenehm zu tragendes Qualitäts High-Tech Material für einfacheres Atmen (auch für Asthmatiker) als mit doppelten oder 3-fachen Lagen. Verunreinigungen werden herausgefiltert und nicht eingeatmet.

NICHT WASCHEN ODER BÜGELN!!!! VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH DESINFIZIEREN!

Wischen Sie Schmutz mit einem feuchten Tuch ab. Bitte regelmäßig Desinfizieren!

Desinfektionsmöglichkeiten:

1. Einsprühen mit einem Desinfektionsmittel.
2. Mittels heißen Dampf aus dem Bügeleisen aus einer Entfernung von ca.5cm
3. In Wasser abkochen
4. 60 Minuten in einen 60°C heißen Ofen legen
5. Setzen Sie die Maske 1 Stunde lang starker UV-Strahlung aus.

Hygieneartikel, daher vom Umtausch ausgeschlossen sofern die Verpackung geöffnet wurde!

ACHTUNG: Kein Medizinprodukt! Diese Gesichtsmasken sind nicht nach Schutzklassen zertifiziert und somit nicht für intensivmedizinische Bereiche geeignet!

